

Maniquí para entrenamiento en CPR "BRAYDEN"

BRAYDEN



El propósito final de la RCP es mantener un flujo de sangre oxigenada al cerebro durante un paro cardíaco para prevenir daños serios al mismo.

“BRAYDEN” es el primer Maniquí para prácticas de RCP con función visual durante el CPR de la circulación sanguínea desde el corazón al cerebro.


Además, con la ayuda del Maniquí de prácticas de RCP “BRAYDEN”, no solo aprenderán fácilmente como realizar un RCP correctamente en caso de necesidad, sino que gracias a las innovaciones que incorpora, las habilidades aprendidas se recordarán toda la vida.

BRAYDEN

Señales luminosas RCP

Estas señales solo lucirán cuando la compresión y la velocidad coincidan correctamente con los valores de referencia. Cuando uno de ellos, por ejemplo, la presión de la compresión o la velocidad no sea correcta, entonces las señales no se iluminarán.

Al estar construido con la tecnología mas avanzada “BRAYDEN” hace posible entrenar a aprendices de cualquier nivel, siendo fácil y simple aprender la manera correcta de realizar un RCP. Aprenderá simplemente, siguiendo atentamente las señales luminosas y viendo como éstas reaccionan a sus prácticas de RCP.

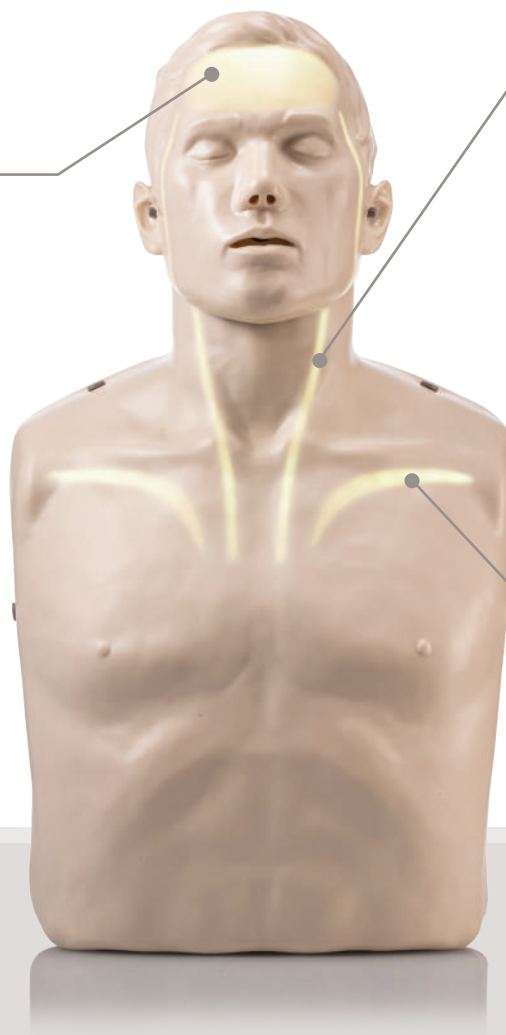

Indicadores de la circulación sanguínea

Estas señales luminosas indican el flujo sanguíneo desde el corazón hasta el cerebro, para que los aprendices puedan fácilmente observarlo mientras se realiza un RCP. Las señales se iluminarán en proporción directa a la profundidad y velocidad de las compresiones, ayudando a mejorar sus sesiones practicas de RCP.

Indicadores de compresión

Estas señales luminosas relacionan directamente la profundidad y velocidad de las compresiones. En otras palabras, las señales del pecho lucirán en proporción directa con la profundidad y velocidad de las compresiones al igual que las señales de circulación sanguínea.

Por ejemplo, cuando se realiza correctamente un RCP, todas las señales luminosas del pecho se iluminarán, sin embargo, estas señales se iluminarán en proporción con la calidad del RCP.

Tamaño : 32 x 59 x 21 cm

Peso : 3.1 kg (Incluyendo las baterías)

Energía: Baterías, Adaptador AC (Opción)

FUNCIONES BÁSICAS

El Maniquí para prácticas de RCP “BRAYDEN” incorpora las siguientes funciones para el Soporte Vital Básico

- ▶ Realistic head tilt and chin lift for opening airway
- ▶ Chest rise with correct ventilation
- ▶ Audible feedback (“click”) with correct compression depth



Movimiento del pecho muy realista con ventilación



Inclinación de cabeza y elevación del mentón para abrir la vía aérea



Conductos nasal y oral que permiten pinzar la nariz



Marcas anatómicas (esternón, caja torácica, horquilla esternal)



Piel y accesorios inocuos.



Se limpia rápida y fácilmente



Señal audible que ayuda a corregir la profundidad de la compresión (Clicker on/off)



Etiquetas para registro y gestión de la información



Dos maneras de funcionamiento: baterías o alimentador AC/DC

▶ Cambio del pulmón desechable (Extraíble)



Remove skins, then lift chin



Insert the artificial lung into the slot




Insert the hall of artificial lung into the guide

Maniquí para entrenamiento en CPR "BRAYDEN"

BRAYDEN

CONTENTS

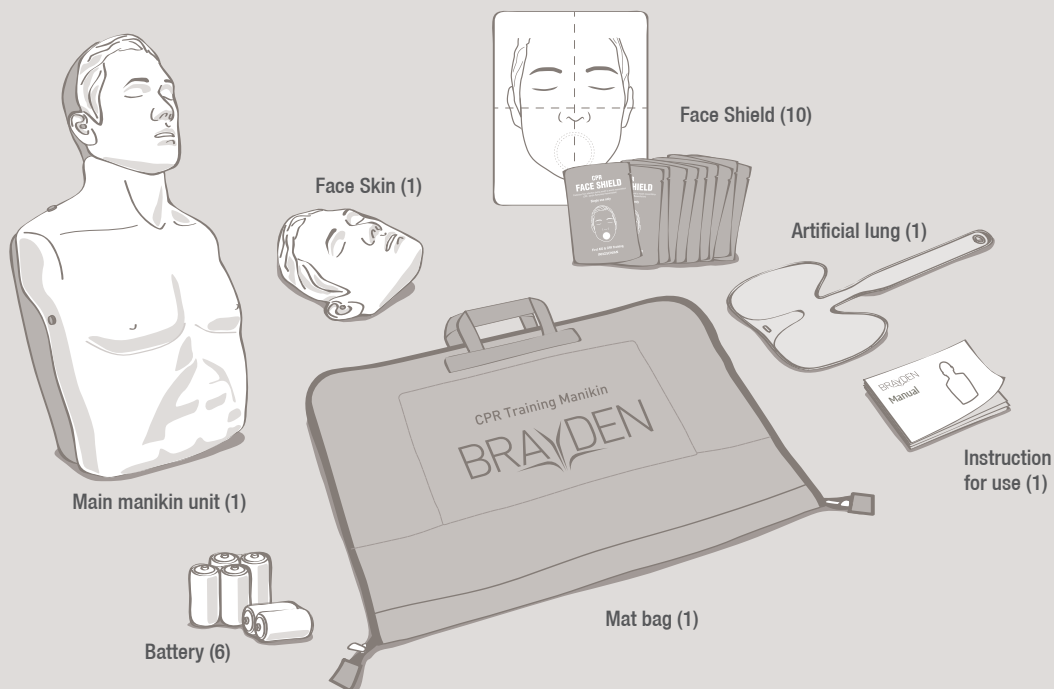

PRODUCT INQUIRIES

INNOSONIAN

3F, 10-11, Seocho-daero19-Gil, Seocho-Gu, Seoul, 137-839, Republic of Korea
Tel. +82 70 4801 5378
Fax. +82 70 8673 5285
Email. info@innosonian.com
www.innosonian.com

BE BRAVE!

A brave decision makes you to save
someone you love.