

**Equivale a 10 mascarillas**


**Transparente**  
especial para lectura labial

**x1**  
+10 filtros desechables

**Masks  
Epi**  <sup>®</sup>  
mascarillas higiénicas reutilizables

Made in Spain | [www.masksepi.com](http://www.masksepi.com)

**PRODUCTO  
TRANSPARENTE  
PATENTADO**

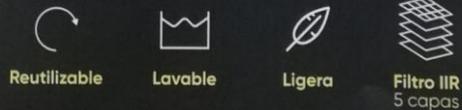

La Mascarilla higiénica reutilizable está fabricada en caucho termoplástico hipoalergénico. Lo que hace de este producto una mascarilla suave y confortable para obtener la mejor comodidad en altas horas de trabajo. Una mascarilla higiénica, con la facilidad y comodidad de su desinfección, ya que se puede lavar con jabón y agua o tan fácil como meterlo en el lavavajillas.

La novedad de este producto es que al ser una mascarilla higiénica reutilizable contiene filtros desechables con una durabilidad recomendada de un máximo de 24 horas. Para poder disfrutar de la mejor comodidad y seguridad durante la exposición externa.

Gracias a sus dos bandas elásticas ajustables hipoalergénicas la comodidad con la mascarillas higiénicas reutilizables MasksEpi está asegurada.

## Mascarilla Higiénica Reutilizable **x1**

### Especificaciones Mascarilla Higiénica

Soporte mascarilla higiénica  
Material TPE hipoalergénico, tacto suave y lavable.  
Con bandas elásticas ajustables hipoalergénicas.

## Filtros Desechables **x10**

### Especificaciones Filtros

10 Filtros desechables.  
Cada filtro recomendamos un uso máximo de 24 horas.  
Fáciles y cómodos de transportar en cualquier bolso, mochila, bolsillo, etc. Equivalen a 10 mascarillas.

Made in Spain

Instrucciones

Ref. SC-01-000214

**Masks  
Epi** 



**INVERSI PROYECTOS INNOVADORES, SL**

B42616912

Pol. Ind. Canastell C/ Clavo Nave 5

03690 - San Vicente del Raspeig - Alicante

+34 966 157 118

Esta mascarilla higiénica reutilizable no es un equipo de protección individual (EPI) ni tampoco un producto sanitario (PS). No está diseñado para sustituir estos. Su función es meramente higiénica. Cumple con los requisitos de funcionamiento de la norma EN 14683:2019 + AC:2019 de mascarillas quirúrgicas puntos 5.2.2, 5.2.3, y 5.2.4 para Tipo IIR



**Contenido de la bolsa:**

- A. Mascarilla higiénica reutilizable fabricada con caucho termoplástico (materiales hipoalergénicos).
- B. 2 Bandas elásticas ajustable hipoalergénica.
- C. Filtro desechable.
- D. Protector del filtro desechable.
- E. Protector del filtro desechable.

Filtros con más del 98% de filtración bacteriana.

**Especificaciones del producto:**


- Soporte mascarilla higiénica
- Material TPE hipoalergénico, tacto suave y lavable.
- Con bandas elásticas ajustables hipoalergénicas.
- 10 Filtros desechables. Cada filtro recomendamos un uso máximo de 24 horas. Estos filtros son fáciles y cómodos de transportar en cualquier bolso, mochila, bolsillo, etc. Equivalen a 10 mascarillas.

**Recomendaciones**


- \* Colocarse la mascarilla higiénica minuciosamente para que cubra la boca y la nariz y anudarla firmemente para que no haya espacios de separación con la cara.
- \* Una vez que vea que el filtro está húmedo, sustituir los discos de filtración.

**¿Cómo se debe utilizar?**

- Antes de su utilización, verifique su buen estado. No debe utilizar una mascarilla higiénica que presente daños o estén sucios sus filtros.
- Lavar las partes plásticas (mascarilla y tapa) con agua y jabón antes del primer uso.
- Recomendamos el descanso de 5 minutos cada 40 minutos de uso.
- Al usar esta mascarilla higiénica, es fundamental lavarla con agua y jabón en cada uso o turno de trabajo y sustituir el filtro cada 24 horas, evitando así que aumente el riesgo de transmisión asociado con el uso.

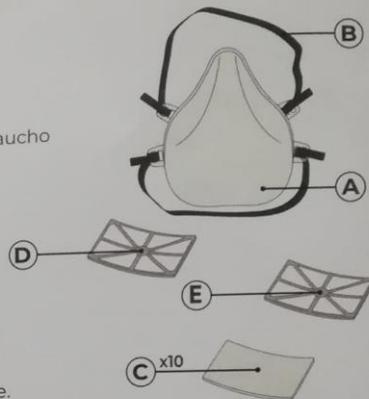

**¿Cómo se pone la mascarilla higiénica reutilizable?**

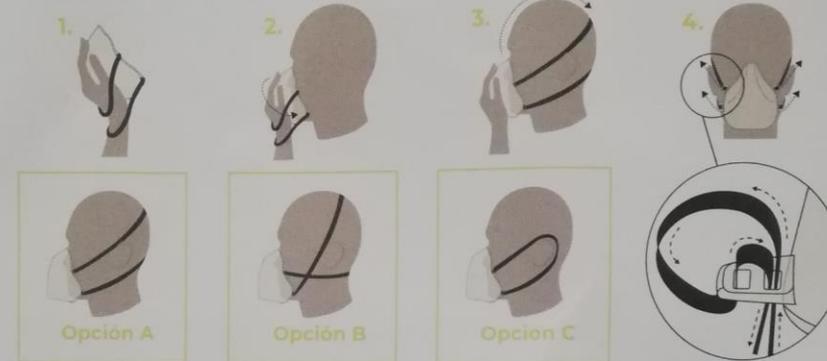

**¿Cómo se cambia el filtro?**

\*Sustituir el filtro cada 24 horas, evitando así que aumente el riesgo de transmisión asociado con el uso.



1. Extraer el filtro y los protectores.
2. Desinfectar todas las piezas y limpiarse las manos antes de coger el filtro nuevo.
3. Colocar el filtro nuevo con la capa lisa y fina hacia arriba.
4. Colocar el protector A, por debajo del filtro.
5. Colocar el protector B sin delizar. Primero un lado y luego el otro.

